

《ケア用品の使い方》

じゅんぴ

1 鏡を見ながら位置をきめる



2 皮膚保護スプレーをつける箇所にスプレーする



つけかた

1 接着剤を人工乳房の裏面のひらひら部分に丁寧に塗る

接着剤の量が少ないと、取れやすくなります。多めの量で隙間のないように丁寧に塗ってください。



- 使用者からのワンポイントアドバイス!
接着剤を中央部分にも塗ることで、密着性が増して安心できます。

シーン別接着例



日常の買い物や、通勤など
接着剤をつけなくても大丈夫!



軽い運動やスポーツの時など
3か所に接着剤を塗る




胸元のあいた服を着る時など
胸の内側に接着剤を塗る



温泉に入る時
ぐるっと一周接着剤を塗る

2 左右のバランスを見ながら 上部→脇→下部→中心部の 順にゆっくりと貼る

シリコンは安全性の高い素材ですが、お肌に密着させて使う製品ですので、初めのうちは使用時間を短めにしてお肌の状態をみながらご使用ください。

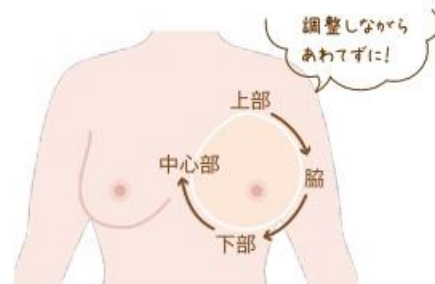

はずしかた



専用リムーバーを、お肌との接着部分に浸すようにつける。めくれてきたら、そこから接着剤の層と皮膚の間に染み込ませながらゆっくりとはがす。お肌に残った接着剤も綺麗に除去し、めらしたタオル等で最後はふき取る。

使用後のお手入れ

- 1 ヒラヒラ部分に残っている接着剤を、リムーバーコットンできれいに取り除きましょう。
- 2 中性洗剤で洗浄します。(ボディソープやハンドソープ等)
- 3 よくすすいだ後、水分をふきとり通気性の良い所で乾かします。

大切なポイント

＼外したらすぐキレイに！／

接着剤の取り残しがあると、ほこりが付いたり硬化した接着剤が積層してしまいきれいな接着ができなくなったり、劣化や破損の原因になったりします。その日のうちにしっかり落としましょう!